



**IQstream TV**

Handleiding




## INHOUDSOPGAVE

---


IN DE DOOS .....	1
PRODUCTOVERZICHT .....	2
AANSLUITEN OP DE TV (SNELLE VERBINDINGSGIDS) ...	3
INSTALLATIE VIA APP .....	4
OPTIMAAL STREAMINGBEREIK .....	5
ALTERNATIEVE AUDIOVERBINDINGEN .....	6
KOPPELING SOUNDBAR/GELUIDSSYSTEEM .....	7
PROBLEEMOPLOSSING AUDIO .....	8
KLANTONDERSTEUNING .....	9

## 1. IN DE DOOS


---

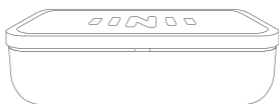


IQstream TV

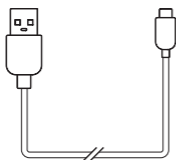


USB-stroomkabel

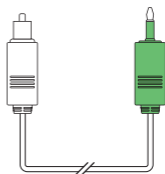

Digitale optische kabel

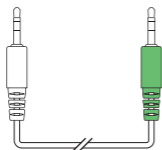


3,5mm AUX-kabel

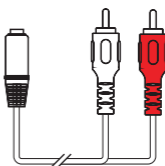


RCA-kabel



Digitale optische adapter

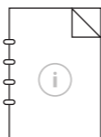

Handleiding

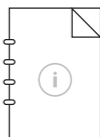


Veiligheids gids

## 2. PRODUCTOVERZICHT

---

VOORKANT

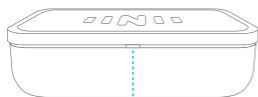

1

ACHTERKANT



2

3

4

1 LED-lichtindicator

2 USB-stroomaansluiting

3 Audio **OUT**put


4 Audio **IN**put

### INDICATOREN LICHTJES

(wanneer ingeschakeld)

---

Instellingsmodus

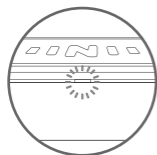


Wit knipperend

Stand-by



Wit opgelicht

Streaming

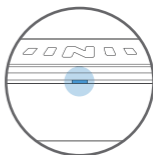


Donkerblauw opgelicht

### 3. AANSLUITEN OP DE TV (SNELLE VERBINDINGSGIDS)

OPTIMALE ERVARING

\*VOORAFGAAN AAN HET INVOEGEN DE BESCHERMKAPPEN VERWIJDEREN

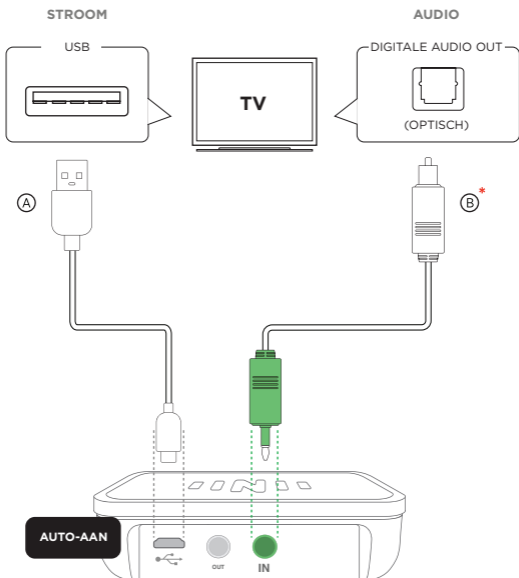

#### Stroom IQstream TV:

Sluit de **A** USB-stroomkabel aan op een USB-poort van uw tv. Als uw tv geen USB-poort heeft, vindt dan een alternatieve USB-stroombron (bijv. oplader).

#### Audio:

Sluit de **B** digitale optische kabel van de digitale audio **OUT** van uw tv aan op de de **IN**put van uw IQstream.

Ga, zodra deze kabels zijn aangesloten, **vervolgens naar pagina 4** "Installatie via App"

## 4. INSTALLATIE VIA APP

---

**Creëer een verbinding tussen uw IQbuds en uw telefoon.  
Open de IQbuds-app wanneer u zich in de buurt van de IQstream bevindt.**

U zult een detectie-pop-up te zien krijgen die u door het installatieproces zal leiden.



Uw IQbuds, IQstream en telefoon zullen met elkaar samenwerken.  
De IQstream-functies zullen door de IQbuds-app bestuurd worden.

---

### UPDATES

Zorg ervoor dat u de meest recente versie van de IQbuds-app heeft.

U zult mogelijk uw IQbuds-firmware moeten updaten. Wij raden u aan om te controleren of er updates zijn:


**[www.nuheara.com/iqbuds-updater](http://www.nuheara.com/iqbuds-updater)**

## 5. OPTIMAAL STREAMINGBEREIK

---

Muren, deuren en andere obstakels kunnen van invloed zijn op het bereik en de kwaliteit.

Plaats, voor de beste ervaring, de IQstream op een plat oppervlak met de LED naar u toe gericht.

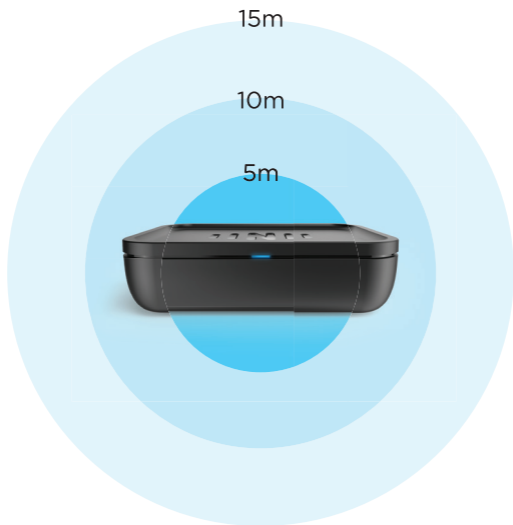

Krachtigst

Zwakst




**HOOR**  
**TV**  
**BETER**



## 6. ALTERNATIEVE AUDIOVERBINDINGEN

ALS UW TV GEEN DIGITALE OPTISCHE POORTEN HEEFT, GEBRUIK DAN EEN VAN DE ONDERSTAANDE OPTIES. DE STROOMAANSLUITING IS HETZELFDE ALS DIE OP PAGINA 3.

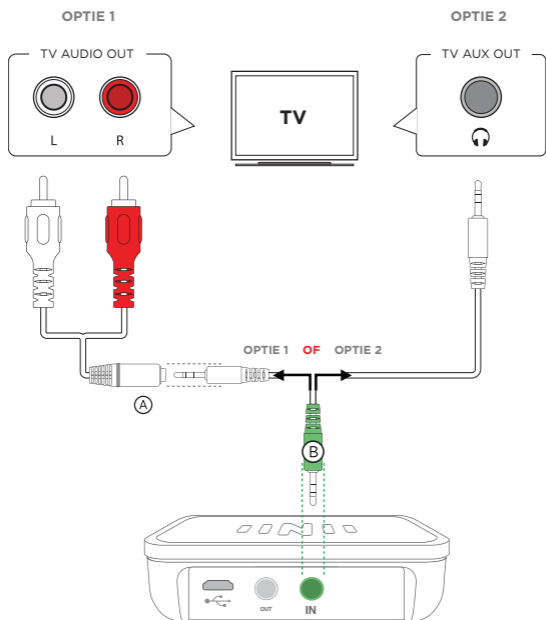

### Optie 1:

Verbind de **(A)** RCA-kabel van uw TV audio **OUT**put met de **(B)** 3,5 mm AUX-kabel en dan met de **IN**put van uw IQstream.

### Option 2:

Verbind de **(B)** 3,5 mm AUX-kabel rechtstreeks vanaf de koptelefoonaansluiting op uw tv, met de **IN**put van uw IQstream.


**Ga, zodra deze kabels zijn aangesloten, naar pagina 4 "Installatie via App"**

## 7. KOPPELING SOUNDBAR/GELUIDSSYSTEEM

De tv is uw primaire geluidsbron. Geluid stroomt:

**UIT** uw tv en naar **(IN)** uw IQstream, dan **UIT** uw IQstream naar **(IN)** uw soundbar/externe speaker.

De audio zal door de 3 apparaten stromen wanneer uw tv aangesloten is op uw IQstream, en vervolgens op uw soundbar.

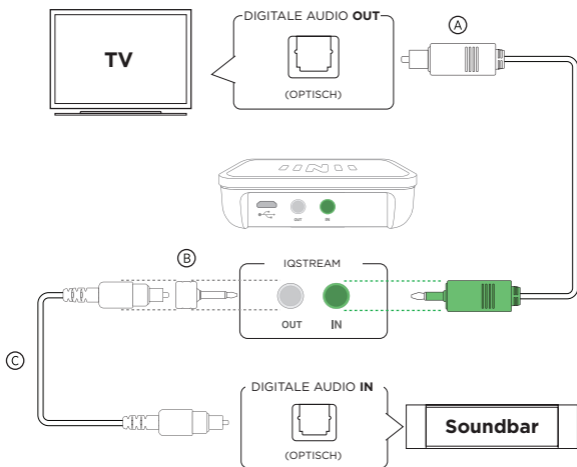

1. Sluit de **(A)** digitale optische kabel van de digitale audio **OUT** op uw tv aan op de de **IN**put van uw IQstream. (Deze stap is mogelijk al voltooid.)
2. Sluit de **(B)** digitale optische adapter (meegeleverd) aan op de **(C)** soundbar digitale optische kabel (niet meegeleverd).
3. Sluit de digitale optische kabel van de soundbar aan op de audio **IN** van de soundbar.

## 8. PROBLEEMOPLOSSING AUDIO

---

Hoort u geen geluid?


Controleer of de audio-aansluitingen in de juiste poorten van de IQstream en uw tv zijn geplaatst. Zorg ervoor dat ze correct zijn verbonden. Raadpleeg uw verkozen verbindingsoptie in de handleiding en controleer zorgvuldig elke verbinding.

---

### Bij gebruik van de digitale optische kabel:

Raadpleeg de handleiding van uw tv om de instellingen van uw geluidsuitvoer te lokaliseren. Wijzig de instelling voor de geluidsuitvoer naar PCM of naar 'bitstream off'.

Meestal te vinden in: Menu > Sound Settings [Menu > Geluidinstellingen]. Kan worden aangeduid als SPDIF of optische uitgang.

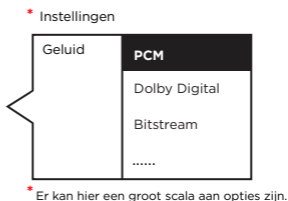

### Bij gebruik van de 3,5 mm AUX-kabel:

1. Het gebruik van externe schijven en computers die op uw tv zijn aangesloten, kunnen problemen met de geluidskwaliteit veroorzaken wanneer er een AUX-kabel gebruikt wordt. Indien mogelijk, gebruik de optie met de digitale optische kabel, zoals vermeld op pagina 3 "Aansluiten op de tv".

2. Het rechtstreeks aansluiten van de AUX-kabel op de koptelefoonaansluiting van uw tv kan ertoe leiden dat de audio geblokkeerd wordt en niet via de tv-luidsprekers afgespeeld kan worden, en de audio alleen via de IQbuds te horen is.

---

Raadpleeg onze pagina voor klantondersteuning om contact met ons op te nemen.

## 9. KLANTENONDERSTEUNING

---



Vragen? We zijn er om u te helpen!

Neem contact op met onze klantenservice.



[care@nuheara.com](mailto:care@nuheara.com)



[www.nuheara.com/support](http://www.nuheara.com/support)