



# IQbuds<sup>2</sup>

## クイックスタートガイド


### パッケージの内容:

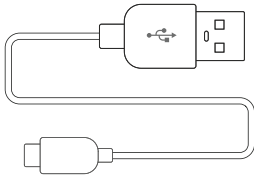


USB充電ケーブル

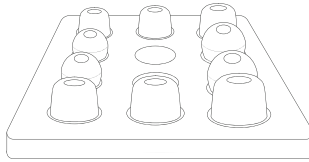


イヤピーストレイ

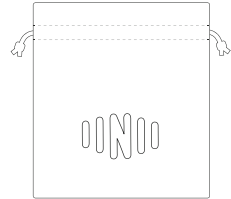

キャリーケース

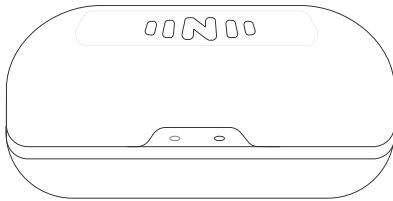

充電ケース

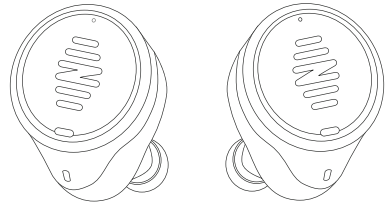

IQBUDS<sup>2</sup>

## IQBUDSとケースを充電する

ケースはIQbudsを収納し、充電します。


外出中でもケースはIQbudsを充電できるので便利です。

USB電源（ウォールチャージャー、コンピュータなど）に接続されたUSBケーブルを介してケースを充電できます。

ケースに付いているランプの色で充電状態を表示します。以下をご覧ください。

フロントランプ (IQBUDS充電)

サイドランプ (ケース充電)

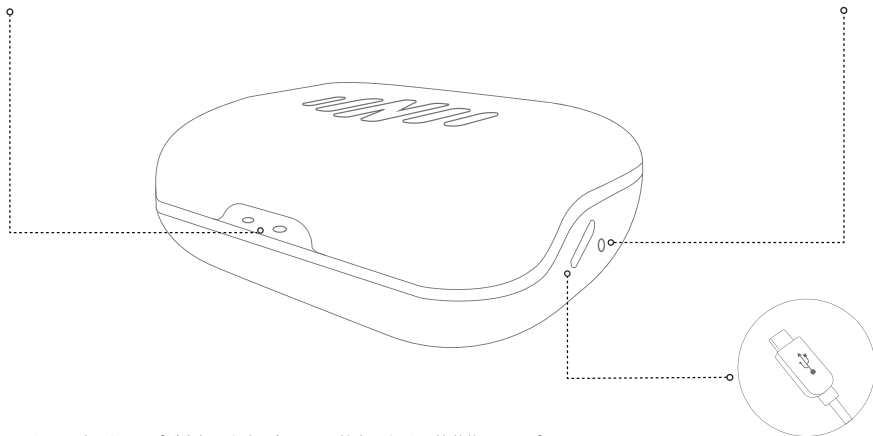

\*ケースを開閉するとランプが点灯します。バッテリー効率のために数秒後にランプは消えます。

\*フロントランプを有効にするには、IQbudsをケースの中に収納してください。

### これらのランプは何を意味していますか？

フロントランプ (IQbudsの充電状態)	サイドランプ (ケースの充電状態)	サイドランプ(ケースの充電状態) (USBケーブルで接続)
<ul style="list-style-type: none"><li>● IQbudsは充電完了しました</li><li>● IQbudsは充電中です</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ケースはIQbudsを1回以上フル充電に対応できる充電容量があります。</li><li>● ケースはIQbudsを1回未満フル充電に対応できる充電容量があります。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ケースは充電完了しました</li><li>● ケースは充電中です</li></ul>

### バッテリー駆動時間

IQbuds <sup>2</sup> バッテリー駆動時間	
<b>最長5時間</b> ストリーミングメディア (音楽、ビデオ、IQstreamTV)	<b>最長8時間</b> 聴覚補助機能 (外界音レベル、Ear IDなど)
*聴覚補助機能とストリーミングメディアを同時に使用すると、バッテリーの駆動時間が短くなる場合があります。	

## IQBUDSを装着する



### IQBUDSを挿す

IQbudsの左右の表示をチェックし、正しい耳に正しいイヤホンを挿していることを確認してください。

挿す前にイヤピースが下になっていることを確認してください。



### 耳栓のように装着する

高音質、重低音、ノイズ低減のためにIQbudsは気密性を保つ必要があります。

耳栓を装着するようにイヤホンを挿してください。



### イヤピースを試してみる

耳にしっかりフィットし、気密性が高い快適な装着感の一番大きなイヤピースを選んでください。

イヤピースはIQbudsから簡単に引き離せません。シリコンまたはフォームをつまんで取り外します。

## アプリセットアップ+ペアリング

IQbudsアプリをダウンロードしてセットアップを始めます。




IQbuds



🔍 Nuheara

セットアップの手順は、全てアプリに表示されています。

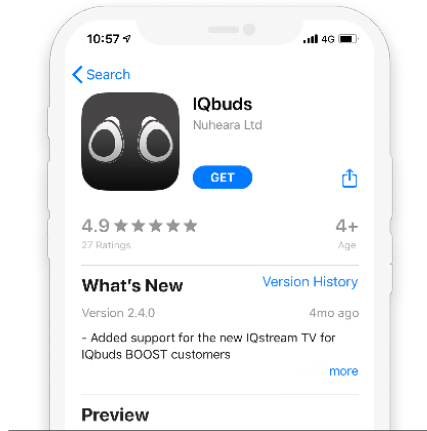

### タップ タッチ

これらの緑色にハイライト表示された部分は、タップセンサーです。タップジェスチャで様々な機能を制御できます。



### ペアリング

ペアリングモードを有効にするには、両方のタップセンサーを約5秒間押し続け、「ペアリング」が聞こえるまで待ちます。


これにより、スマートフォンはbluetooth設定及びアプリでIQbudsを検出できるようになります。

# BLUETOOTH

## iOS (Apple)

ペアリング画面の後に、ご使用のスマートフォンが実行しているソフトウェアのバージョンに基づいて異なるオプションが表示されます。


iOS 13以降を搭載したiPhoneでは、アプリでペアリングできます。次のように、ペアリングを求めるポップアップメッセージが表示されます。

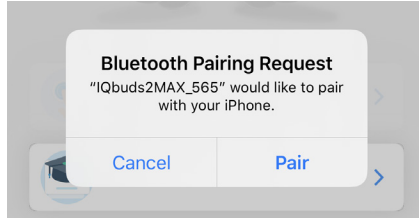

\*IQbuds2MAX\_XXX 全てのIQbudsには、固有の3文字／数字コードがあります。

「ペア」をタップすると、アプリを進めてプロセスを完了することができます。

iPhoneがiOS 13より前のソフトウェアバージョンを搭載している場合、アプリを終了し、bluetooth設定に移動して、そこにあるIQbudsに接続するよう求められます。以下を参照してください。

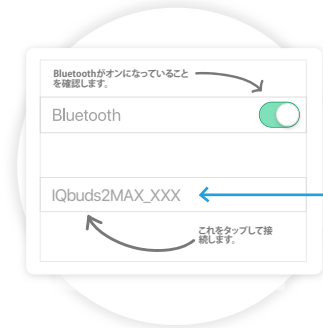

bluetooth 設定に移動し、bluetoothがオンになっていることを確認してください。左側で一致する名前を見つけます。(XXX は固有のコードを表します)。

IQbuds が接続されたら、アプリに戻ってプロセスを続行します。アプリに戻ると、bluetoothペアリングポップアップメッセージが表示されます。「ペア」をタップします。

ご使用のスマートフォンのソフトウェアのバージョンが不明な場合は、次のサイトにアクセスしてください。

### 設定>一般>情報>

「ソフトウェアバージョン」という項目があり、その横にバージョン番号が表示されます。

## Android(アンドロイド)

ペアリング画面の後に、次のように、接続を求めるポップアップメッセージが表示されます。



\*IQbuds2MAX\_XXX 全てのIQbuds には、固有の3文字 / 数字コードがあります。

「接続」をタップすると、アプリを進めてプロセスを完了することができます。

ペアリングが適切に有効化していない場合は、ペアリング画面に戻る場合があります。その場合、ペアリングアクションを再試行し、「ペアリング」が聞こえるまで待ちます。次の画面が表示されます。



bluetooth 設定に移動し、bluetoothがオンになっていることを確認してください。左側で一致する名前を見つけてます。(XXX は固有のコードを表します)。

IQbuds が接続されたら、アプリに戻ってプロセスを完了します。

接続された画面が表示され、アプリで続行できます。

## タップ タッチ コントロール



以下はデフォルト設定です。アプリのタップタッチでカスタマイズできます。

これにより、様々な機能を選択して様々なタップジェスチャに割り当てることができるため、IQbudsを制御する方法をカスタマイズできます。

\*通話機能は変更できません。

<input checked="" type="radio"/> <b>左タップ</b>	<b>右タップ</b> <input checked="" type="radio"/>
再生／一時停止  通話機能: 応答 サイレントモード オン／オフ	外界音 オン／オフ
<input checked="" type="radio"/> <b>左ダブルタップ</b>	<b>右ダブルタップ</b> <input checked="" type="radio"/>
Siriを有効にする	Siriを有効にする
<input checked="" type="radio"/> <b>左ロングタップ</b>	<b>右ロングタップ</b> <input checked="" type="radio"/>
なし  通話機能: 通話を拒否／通話を終了	ロケーションの変更