



IQstream TV


Brugsvejledning




INDHOLDSFORTEGNELSE

KASSENS INDHOLD	1
PRODUKTOVERSIGT	2
TILSLUTNING TIL TV (VEJLEDNING TIL HURTIG TILSLUTNING)	3
OPSÆTNING I APPEN	4
OPTIMAL RÆKKEVIDDE FOR STREAMING	5
ALTERNATIVE LYDTILSLUTNINGER	6
LYDBJÆLKE/SAMMENKOBLING AF LYDSYSTEM	7
FEJLFINDING I FORBINDELSE MED LYD	8
KUNDESUPPORT	9


1. KASSENS INDHOLD

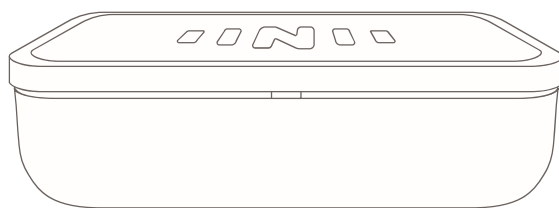


IQstream TV

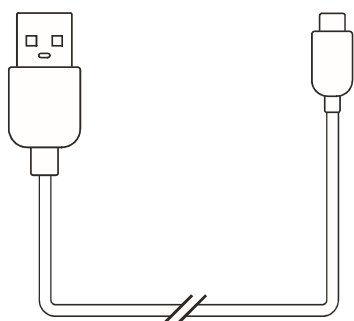


USB-strømkabel

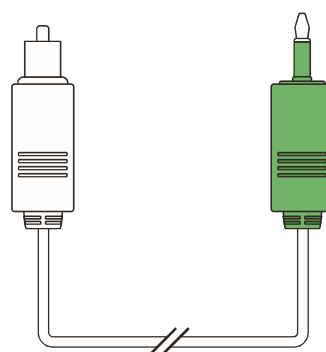


Digitalt optisk kabel

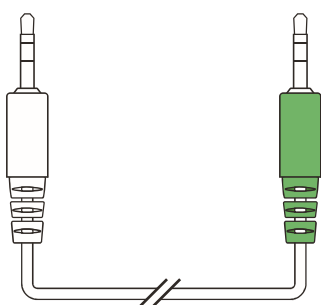


3,5 mm AUX-kabel

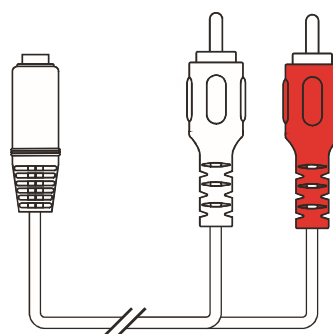


RCA-kabel

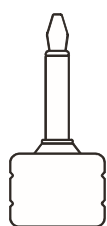

Digital optisk adapter

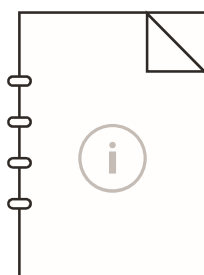


Brugsvejledning

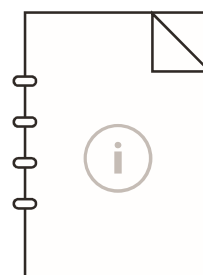

Sikkerhedsvejledning


2. PRODUKTOVERSIGT

FOR

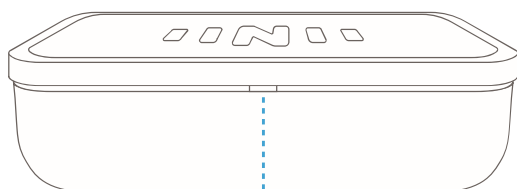

1

BAG

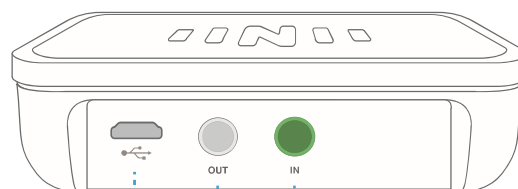

2

3

4

1 LED-lysindikator


2 USB-strømsik

3 Lyd**UDGANG**

4 Lyd**INDGANG**


LYSINDIKATORER (Strømforsynet)

Opsætningsfunktion

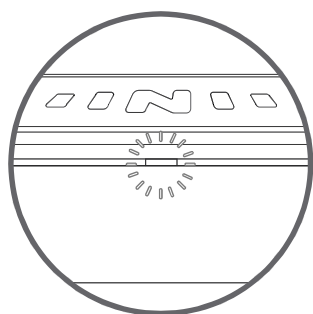


Hvidt blinkende

Standby

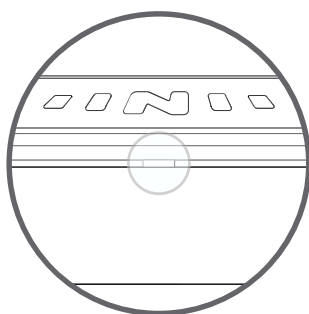

Hvidt lysende

Streaming


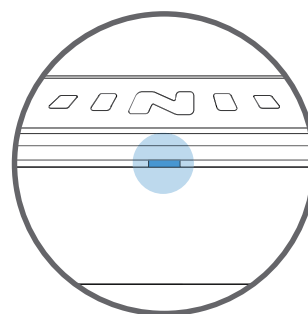


Mørkeblåt lysende

3. TILSLUTNING TIL TV (VEJLEDNING TIL HURTIG TILSLUTNING)

OPTIMAL OPLEVELSE

*FJERN BESKYTTELSESHÆTTER FØR ISÆTNING.

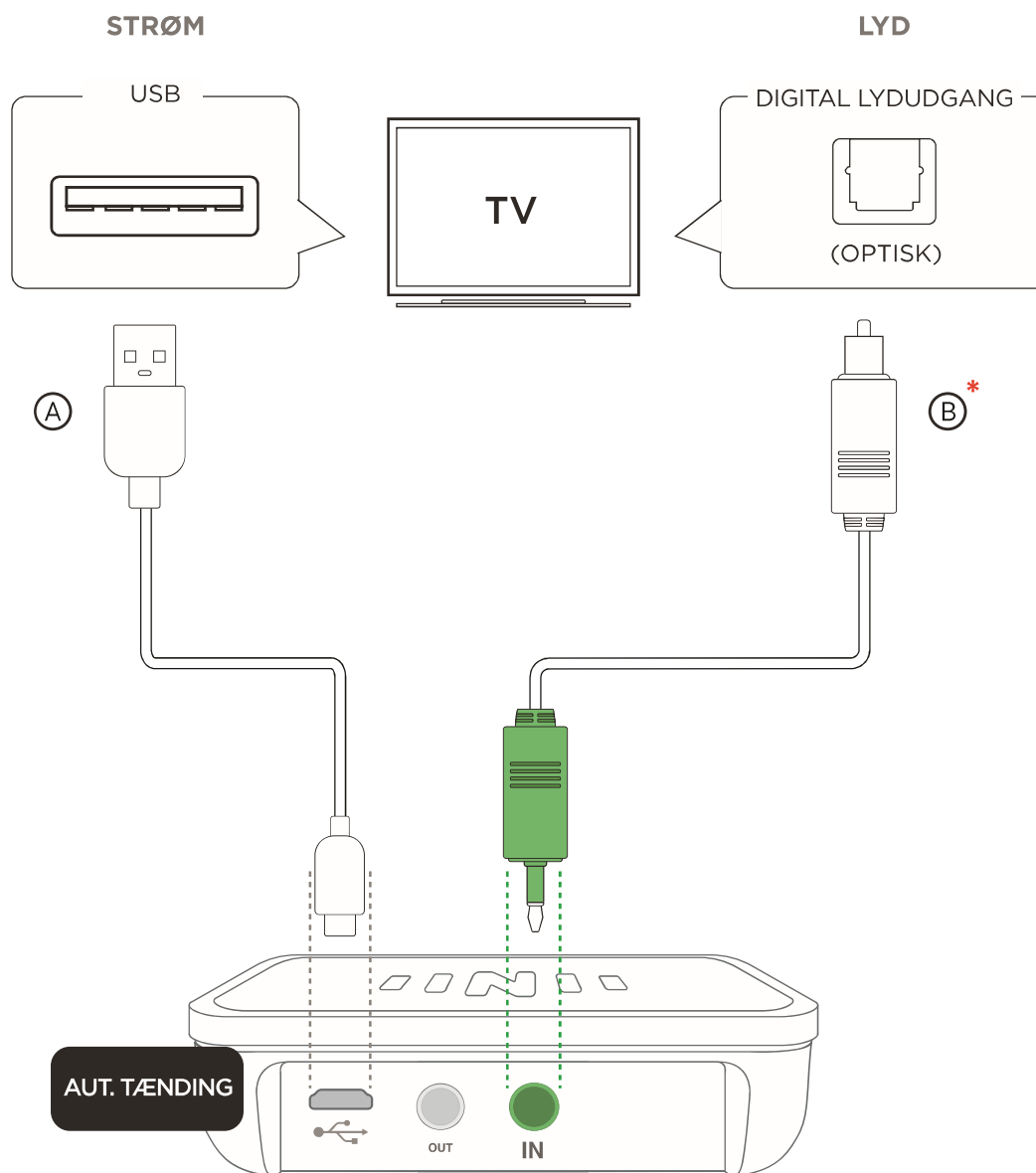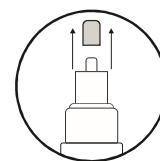

Tænd for IQstream TV:

Tilslut (A) USB-strømkablet til en USB-port på dit TV. Hvis dit TV ikke har en USB-port, skal du finde en alternativ USB-strømkilde (f.eks. vægoplader).

Lyd:

Tilslut det (B) digitale optiske kabel fra den digitale **LYDUDGANG** på dit TV til **INDGANGEN** på din IQstream.

Når du har tilsluttet disse kabler, skal du gå til side 4 "Opsætning i appen".

4. OPSÆTNING I APPEN

**Tilslut dine IQbuds til din telefon.
Stå tæt på din IQstream, og åbn IQbuds-appen.**

Du får vist en pop op-meddelelse og bliver vejledt gennem opsætningen.



Dine IQbuds, din IQstream og telefon vil virke sammen.
IQbuds-appen vil styre IQstream'ens funktioner.

OPDATERINGER

Sørg for, at du har den seneste version af IQbuds-appen.


Du skal muligvis opdatere IQbuds-firmwaren. Vi foreslår, at du tjekker de seneste opdateringer via:

www.nuheara.com/iqbuds-updater

5. OPTIMAL RÆKKEVIDDE FOR STREAMING

Vægge, døre og andre forhindringer kan påvirke rækkevidde og kvalitet.

For at få den bedste oplevelse skal du placere IQstream'en på en flad overflade med LED-lysene vendt mod dig.

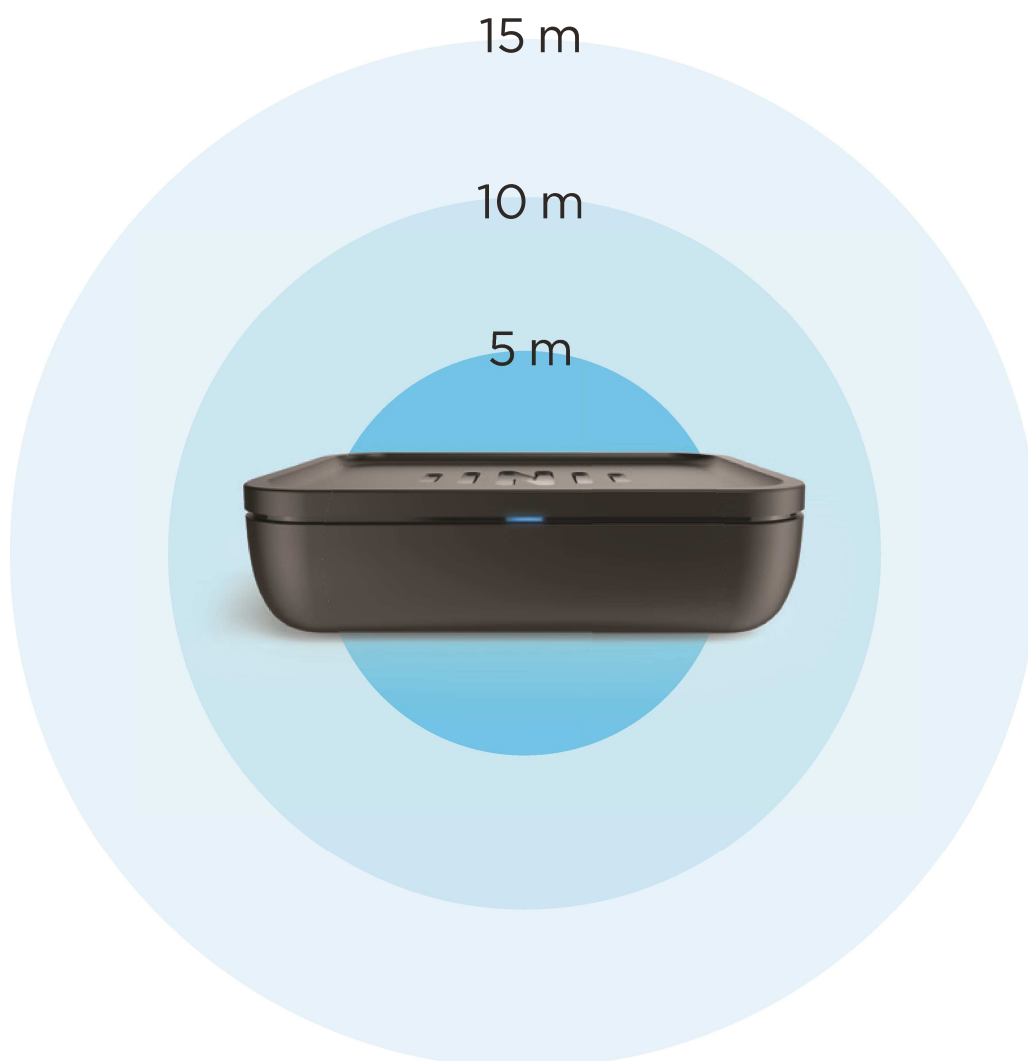

Stærkest


Svagest



HØR
TV
BEDRE

6. ALTERNATIVE LYDTILSLUTNINGER

HVIS DIT TV IKKE HAR DIGITALE OPTISKE PORTE, SKAL DU ANVENDE NEDENSTÅENDE MULIGHEDER. STRØMTILSLUTNINGEN ER DEN SAMME SOM PÅ SIDE 3.

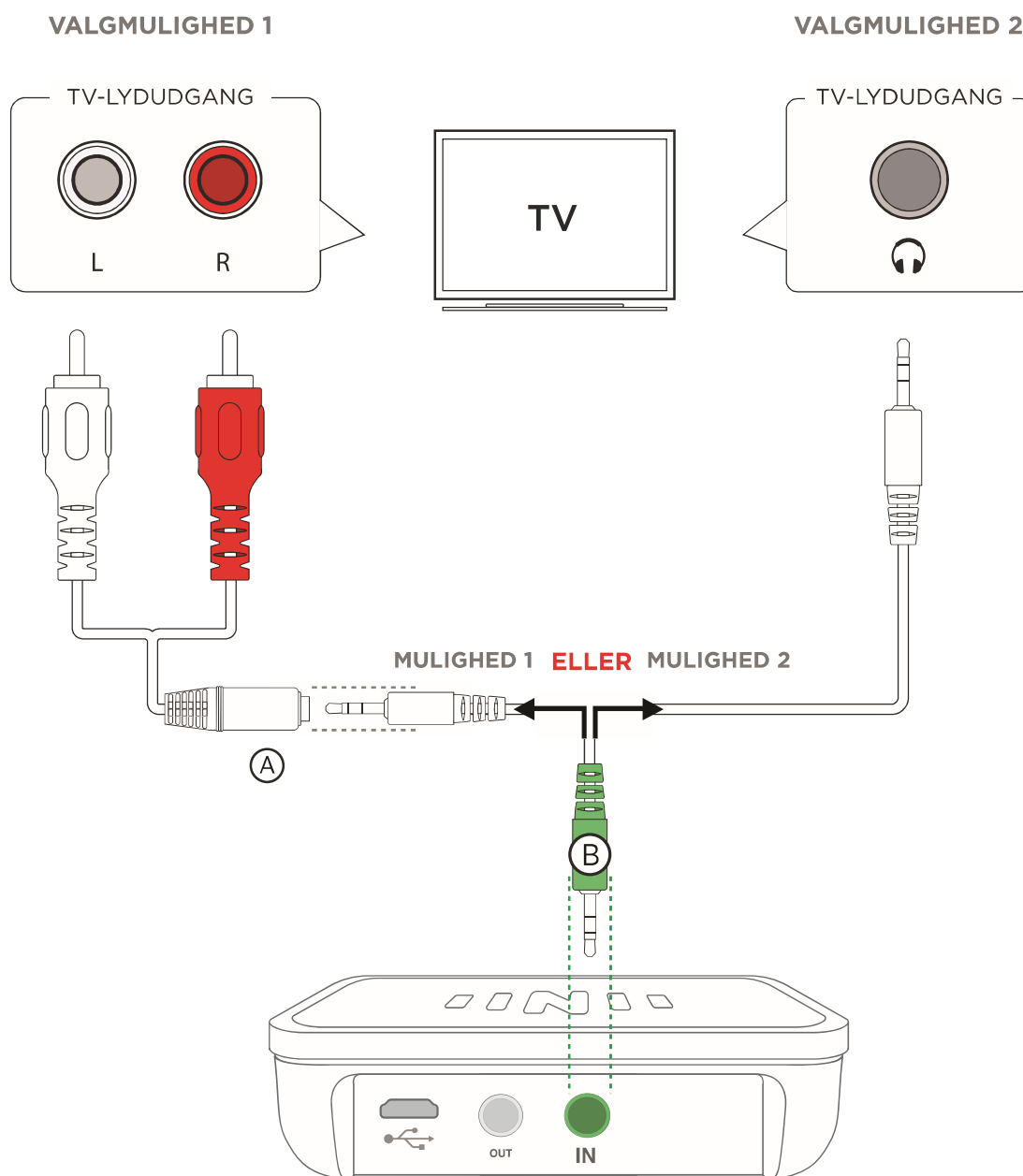

Mulighed 1:

Tilslut **A** RCA-kablet fra dit TV's **LYDUDGANG** i **B** 3,5 mm AUX-kablet og derefter i **INDGANGEN** på din Qstream.

Mulighed 2:

Tilslut **B** 3,5 mm AUX-kablet direkte fra hovedtelefonens stik på dit TV i **INDGANGEN** på din IQstream.


Når du har tilsluttet disse kabler, skal du gå til side 4 "Opsætning i appen".

7. LYDBJÆLKE/SAMMENKOBLING AF LYDSYSTEM

TV'et er din primære lydkilde. Lyden vil komme:

UD af dit TV og **IND** i IQstream, og derefter **UD** af din IQstream og **IND** i din lydbjælke/eksterne højttaler.

Ved at tilslutte dit TV til IQstream'en og videre til din lydbjælke har lyden mulighed for at strømme gennem alle 3 enheder.

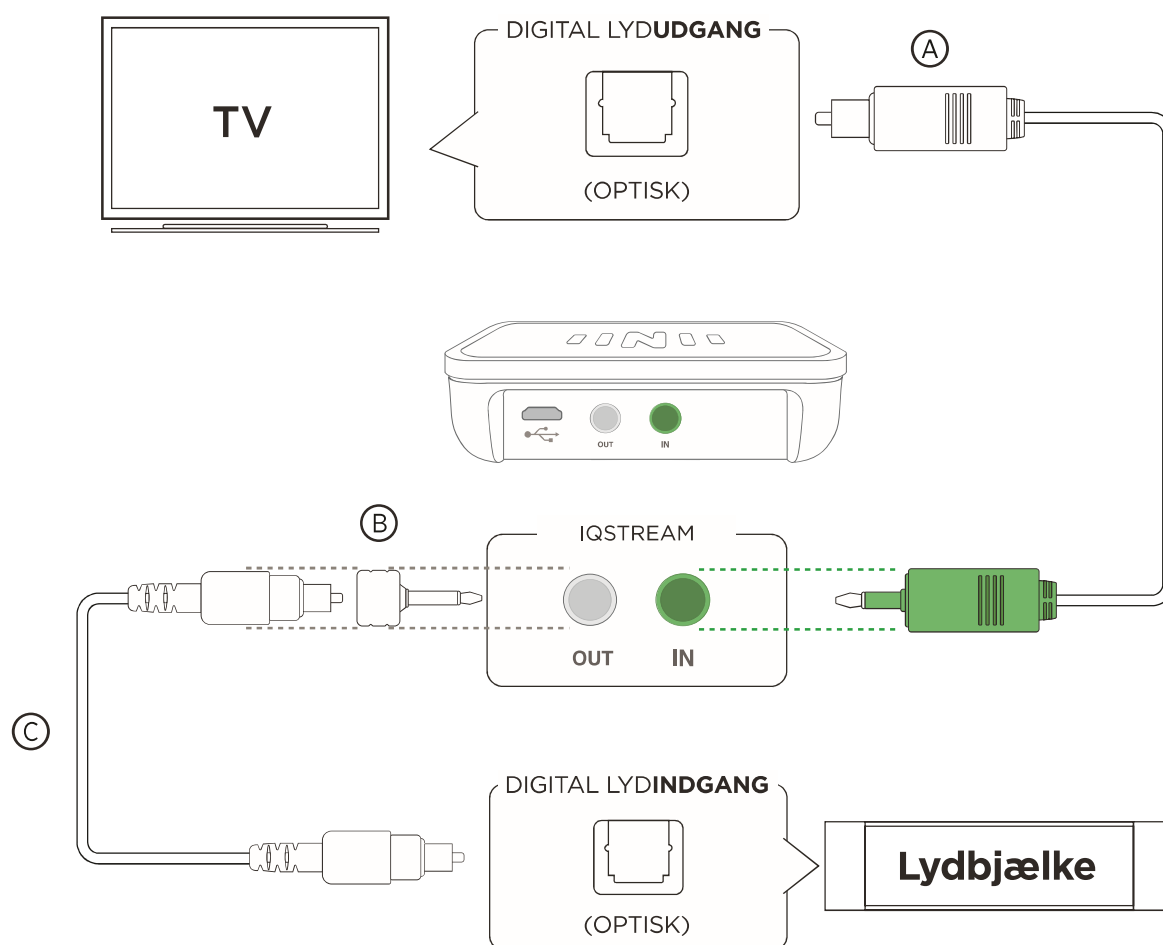

1. Tilslut det (A) digitale optiske kabel fra den digitale **LYDUDGANG** på dit TV til **INDGANGEN** på din IQstream. (Dette trin kan allerede være gennemført).

2. Tilslut den (B) digitale optiske adapter (medfølger) til (C) lydbjælkens digitale optiske kabel (medfølger ikke).

3. Tilslut lydbjælkens digitale optiske kabel til lydbjælkens **LYDINDGANG**.

8. FEJLFINDING I FORBINDELSE MED LYD



Hører du ingen lyd?

Kontrollér, at lydkablerne er placeret i de rigtige porte i IQstream'en og dit TV. Det skal sikres, at de er isat korrekt. Se dine foretrukne tilslutningsmuligheder i vejledningen, og kontrollér omhyggeligt hver enkelt tilslutning.

Ved brug af det digitale optiske kabel:

Kontrollér brugsvejledningen til dit TV for at lokalisere lydudgangsindstillingerne. Skift lydudgangsindstillingen til PCM eller bitstream fra.

Disse indstillinger findes almindeligvis under: Menu > Lydindstillinger. Disse kaldes også SPDIF eller optisk udgang.

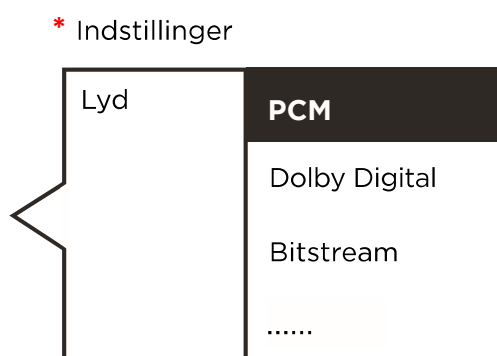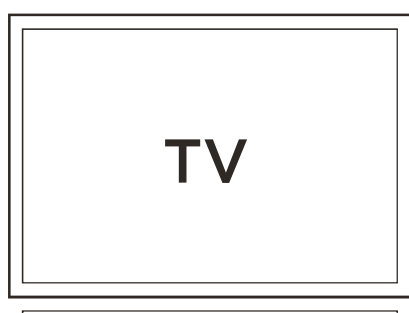

* Der kan være flere valgmuligheder her.

Ved brug af 3,5 mm AUX-kabel:

1. Brug af eksterne drev og computere, som er forbundet til dit TV, kan skabe problemer med lyd kvaliteten, hvis du bruger AUX-kablet. Hvis du har mulighed herfor, skal du anvende det digitale optiske kabel som vist på side 3 "Tilslutning til TV".

2. Tilslutning af AUX-kablet direkte til hovedtelefonstikket på dit TV kan forhindre afspilning af lyden gennem TV-højttalerne og kun gøre det muligt at høre lyden gennem dine IQbuds.

Se vores kundesupportside for at vælge din foretrukne mulighed for kontakt, hvis du har brug for yderligere hjælp.

9. KUNDESUPPORT



Har du spørgsmål? Vi er her for at hjælpe dig!

Kontakt vores kundesupportteam.



care@nuheara.com



www.nuheara.com/support