



# IQstream TV

Manuel d'instructions




## TABLE DES MATIÈRES

---


DANS L'EMBALLAGE .....	1
APERÇU DU PRODUIT .....	2
BRANCHEMENT TV (GUIDE BRANCHEMENT RAPIDE) .....	3
INSTALLATION PAR APP .....	4
PORTÉE OPTIMALE DE STREAMING .....	5
CONNEXIONS AUDIO ALTERNATIVE .....	6
BARRE AUDIO/ RÉSEAU SYSTÈME AUDIO .....	7
PROBLÈMES AUDIO .....	8
SERVICE CLIENT .....	9

## 1. DANS L'EMBALLAGE


---

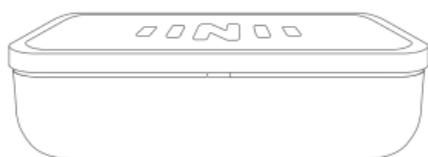


TV IQstream

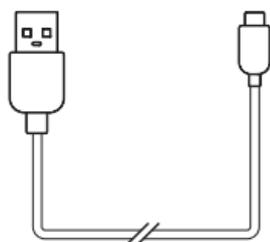


Câble alimentation USB

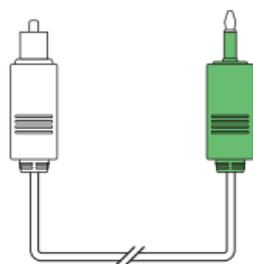

Câble optique numérique

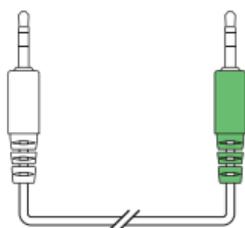


Câble AUX 3,5mm

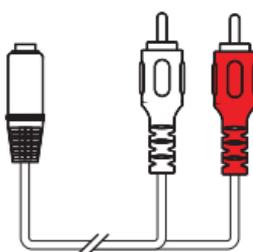


Câble RCA



Adaptateur optique numérique

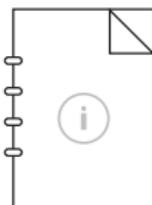

Manuel d'instructions

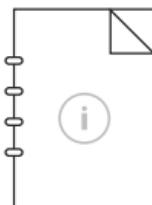


Guide de sécurité

## 2. APERÇU DU PRODUIT


---

PARTIE FRONTALE

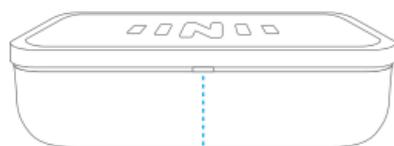

1

DOS

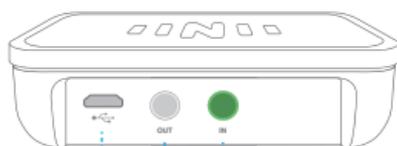

2

3

4

1 Témoin lumineux LED

2 Entrée alimentation USB


3 **SORTIE** (OUT) Audio

4 **ENTRÉE** (IN) Audio


### TÉMOINS SITUATION LUMIÈRES (si branché)

---


Mode installation

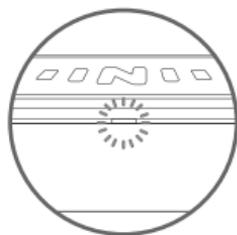

Standby

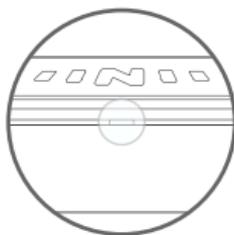

Streaming

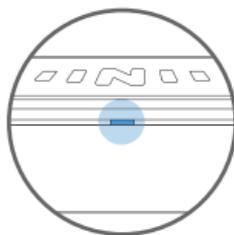

Témoin clignotant blanc


Témoin blanc fixe

Témoin bleu foncé fixe

### 3. BRANCHEMENT À TV (QUICK BRANCHER GUIDE)


EXPÉRIENCE OPTIMALE

• RETIRER LES CAPUCHONS DE PROTECTION AVANT DE BRANCHER.

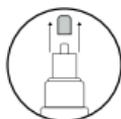

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

AUDIO

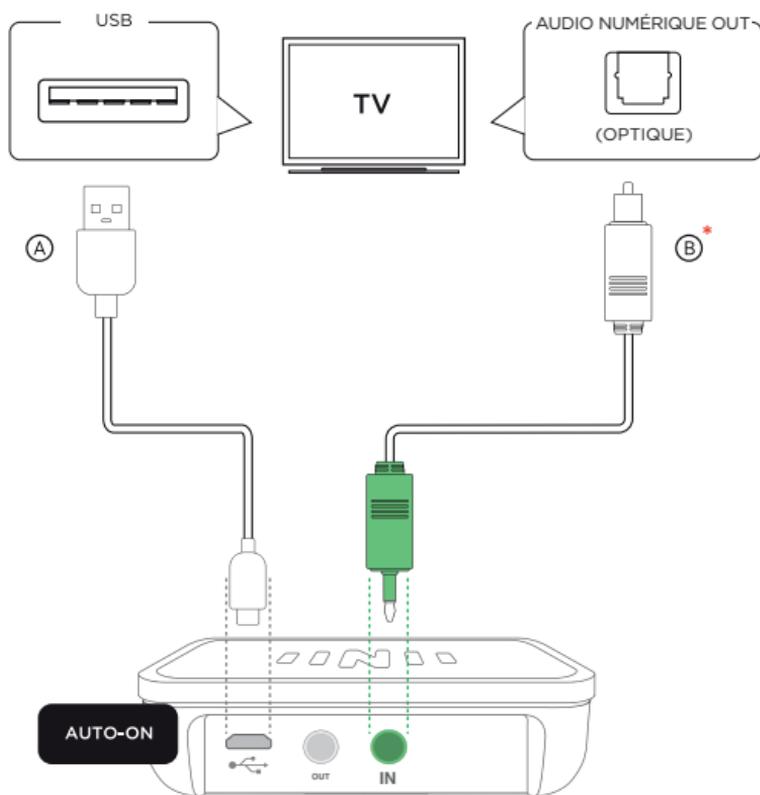

#### Alimentation TV IQstream :

Branchez le câble d'alimentation USB (A) à un port USB de votre TV. Si votre TV n'a aucun port USB, cherchez une source d'alimentation USB alternative (par ex. un chargeur mural.)

#### Audio:

Branchez câble optique numérique (B) de la **SORTIE** (OUT) audio numérique sur votre TV à l'**ENTRÉE** (IN) de votre IQstream.

**Une fois que ces câbles ont été branchés, allez à la page 4 "In App Setup" (Installation App)**

## 4. SUR APP INSTALLATION

---

**Brancher vos IQbuds à votre téléphone.  
Placez-vous près de votre IQstream et ouvrez l'app IQbuds.**

Vous recevrez un pop-up de détection et vous serez guidé pour faire l'installation.



Votre IQbuds, IQstream et téléphone fonctionnent tous ensemble.  
L'app IQbuds contrôle les fonctions de l' IQstream.

---

### MISES À JOUR

Assurez-vous que vous avez la dernière version de l'app d'IQbuds.

Il se pourrait que vous deviez mettre à jour votre logiciel IQbuds. Vous pouvez le trouver sur :


**[www.nuheara.com/iqbuds-updater](http://www.nuheara.com/iqbuds-updater)**

## 5. PORTÉE STREAMING OPTIMALE

---

Les murs, portes et autres obstacles peuvent affecter tant la portée que la qualité.

Pour obtenir les meilleurs résultats, placez l'IQstream sur une surface plane avec la LED tournée vers vous.

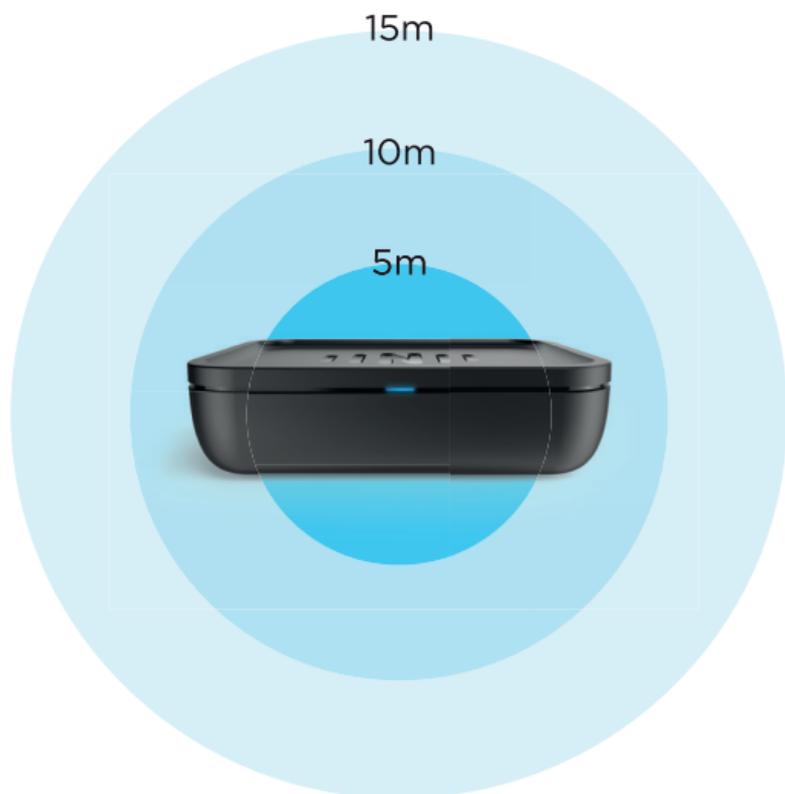

Le maximum


Le minimum



**MIEUX  
ÉCOUTER  
LA TV**

## 6. INVERSER LES BRANCHEMENTS

SI VOTRE TV N'A PAS DE PORTS OPTIQUES NUMÉRIQUES, UTILISEZ LES OPTIONS SUIVANTES. BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES COMME SUR LA PAGE 3.

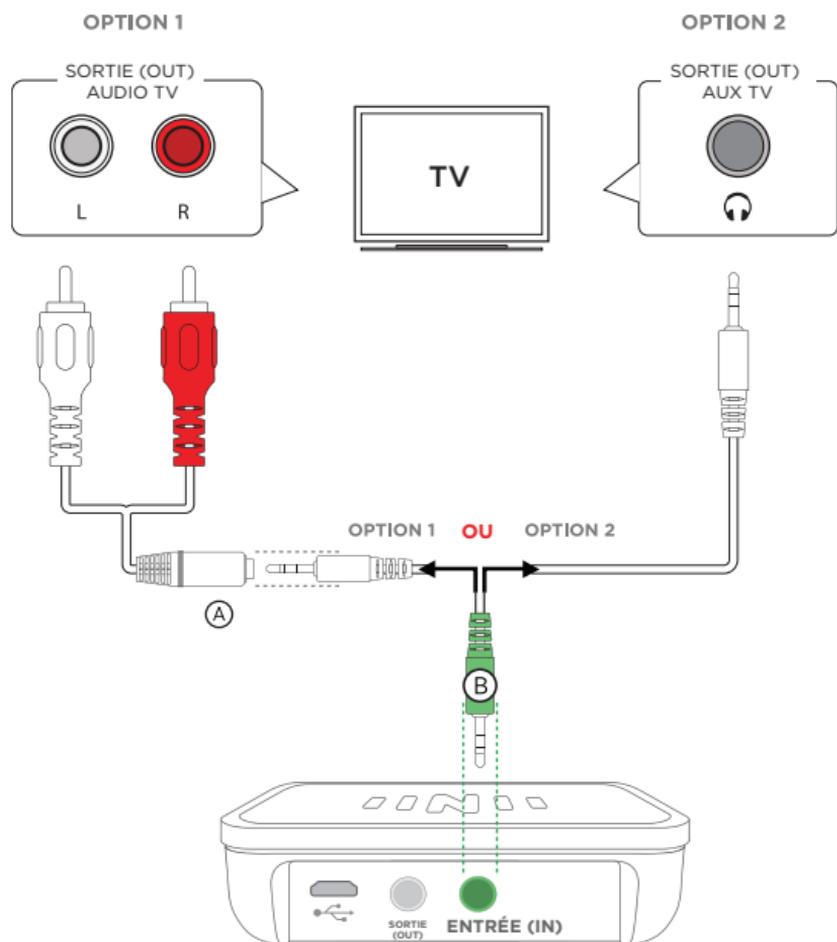

### Option 1:

Branchez le câble RCA (A) de la **SORTIE** (OUT) audio de votre TV, sur le câble AUX (B), puis sur l'**ENTRÉE** (IN) de votre IQstream.

### Option 2:

Branchez le câble AUX (B) de 3,5mm directement de la prise casque de votre TV sur l'**ENTRÉE** (IN) de votre IQstream.


**Une fois que ces câbles ont été branchés, allez à la page 4 "In App Setup" (Installation App)**

## 7. BARRE AUDIO/ SYSTÈME DE RÉSEAU AUDIO

La TV est votre source audio primaire. Le son proviendra :

De votre TV et à l'IQstream, puis de votre IQstream à votre barre audio/haut-parleur externe.

Si vous branchez votre TV, à l'IQstream, et à la barre audio, le son proviendra des trois dispositifs.

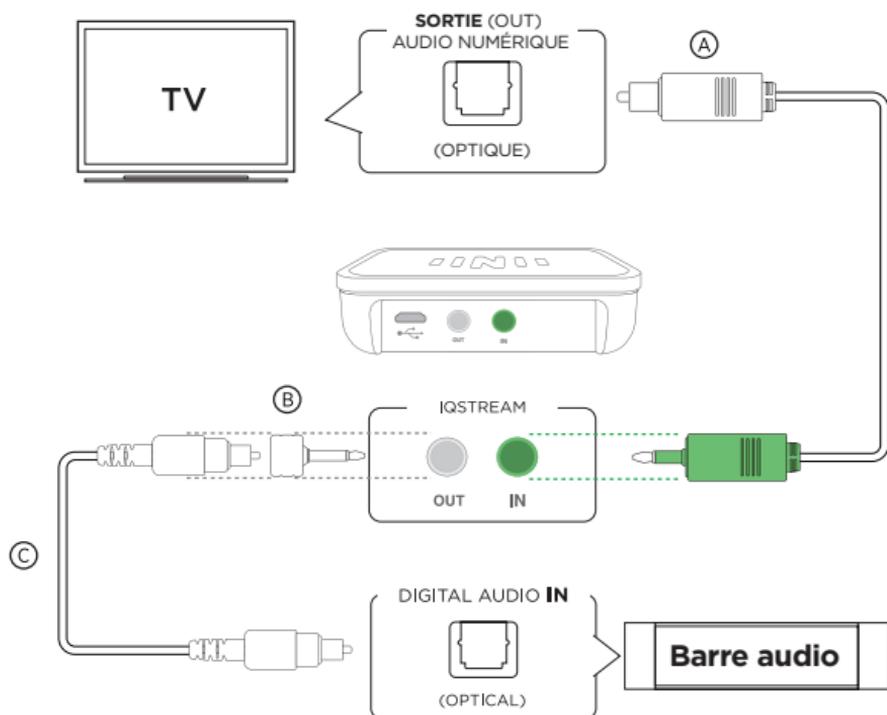

1. Branchez le câble optique numérique (A) de la **SORTIE** (OUT) audio numérique de votre TV, sur l'**ENTRÉE** (IN) de votre IQstream. (Ceci pourrait être déjà fait)
2. Branchez l'adaptateur optique numérique (B) (fourni) au câble optique numérique (C) (non fourni) de la barre audio.
3. Branchez le câble optique numérique à l'**ENTRÉE** (IN) de la barre audio.

## 8. PROBLÈMES AVEC L'AUDIO

---

Aucun son ne vous parvient ?

Vérifier que les branchements de l'audio ont été placés dans ports corrects sur l'IQstream et votre TV. Veiller à ce qu'ils soient bien insérés. Référez-vous à vos meilleures options de branchement dans le manuel et vérifiez chacune d'elles soigneusement.

---


### Si vous utilisez le câble optique numérique :

Vérifier votre manuel de TV pour repérer le réglage de sortie du son. Passer le réglage de sortie du son au PCM ou placer haut débit sur off.

Généralement trouvé sur : « Menu > Sound Settings » (Réglage son). Il peut être indiqué comme SPDIF ou sortie optique.



\* Réglages

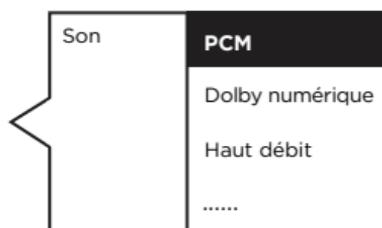

\* Il pourrait y avoir une ample gamme d'options.

---

### Si vous utilisez le câble AUX de 3,5mm :

1. Si vous branchez des drives et des ordinateurs externes sur votre TV, cela pourrait causer des problèmes quant à la qualité audio avec le câble AUX. Si cela est possible, utilisez le câble optique numérique. Voir page 3 « Brancher à la TV ».

2. Si vous branchez directement le câble AUX sur la prise casque de votre TV, l'audio pourrait se bloquer au travers des haut-parleurs de la TV et ne permettrait que son passage par les IQbuds.

---

Si vous avez besoin d'aide, allez à la page du service client pour y trouver la méthode de contact qui vous sied le mieux.

## 9. SERVICE CLIENT

---



Avez-vous des questions ? Nous sommes ici pour vous aider !

Contactez notre équipe de service client.



[care@nuheara.com](mailto:care@nuheara.com)



[www.nuheara.com/support](http://www.nuheara.com/support)