



IQstream TV


Manuale di istruzioni




INDICE

NELLA SCATOLA	1
PANORAMICA DEL PRODOTTO	2
CONNETTERSI ALLA TV (GUIDA RAPIDA AL COLLEGAMENTO)	3
CONFIGURAZIONE NELL'APP	4
GAMMA DI STREAMING OTTIMALE	5
CONNESSIONI AUDIO ALTERNATIVE	6
COLLEGAMENTO SOUND BAR/ SOUND SYSTEM	7
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI AUDIO	8
SERVIZIO CLIENTI	9


1. NELLA SCATOLA

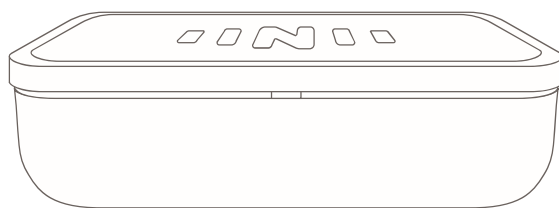


IQstream TV

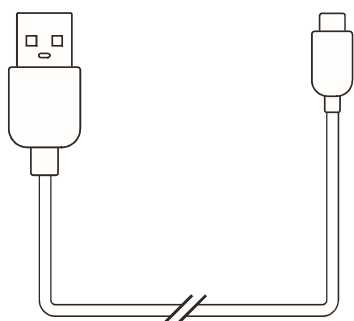


Cavo di alimentazione USB

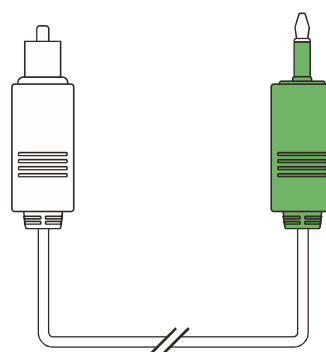


Cavo ottico digitale

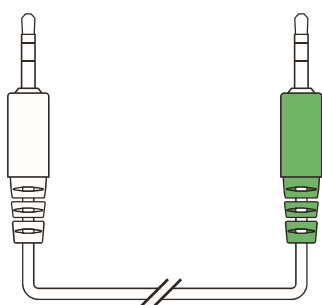


Cavo 3.5mm AUX

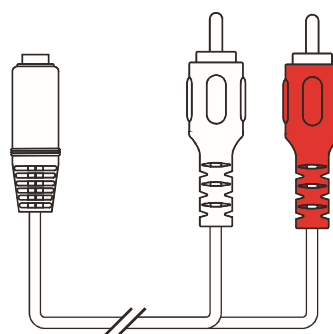


Cavo RCA

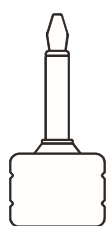

Adattatore ottico digitale

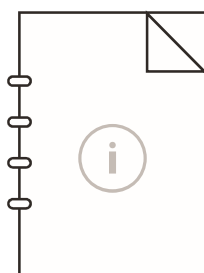


Manuale di istruzioni

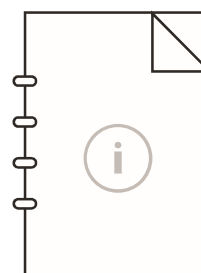

Guida di sicurezza


2. PANORAMICA DEL PRODOTTO

DAVANTI

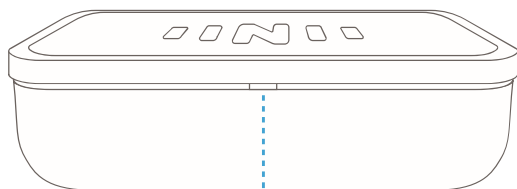

1

DIETRO

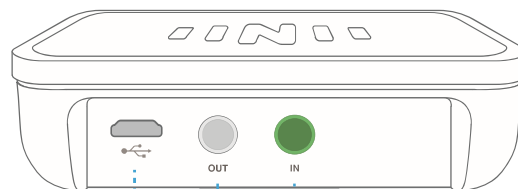

2

3

4

1

Indicatore luminoso a LED

2

Ingresso alimentazione USB

3


USCITA audio

4

INGRESSO audio


INDICATORI DI STATO LUMINOSI (Quando alimentati)

Modalità d'impostazione

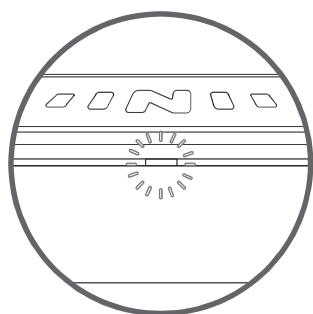


Lampeggiante bianco

Standby

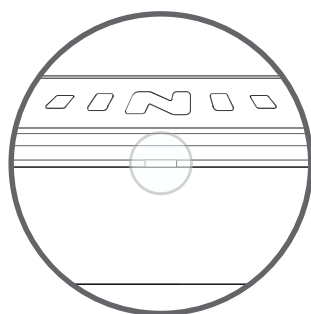

Bianco costante

Streaming


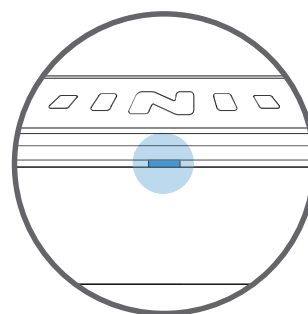


Blu profondo costante

3. CONNETTERSI ALLA TV (GUIDA RAPIDA AL COLLEGAMENTO)

ESPERIENZA OTTIMALE

*TOGLIERE I CAPPUCCI PROTETTIVI
PRIMA D'INSERIRE

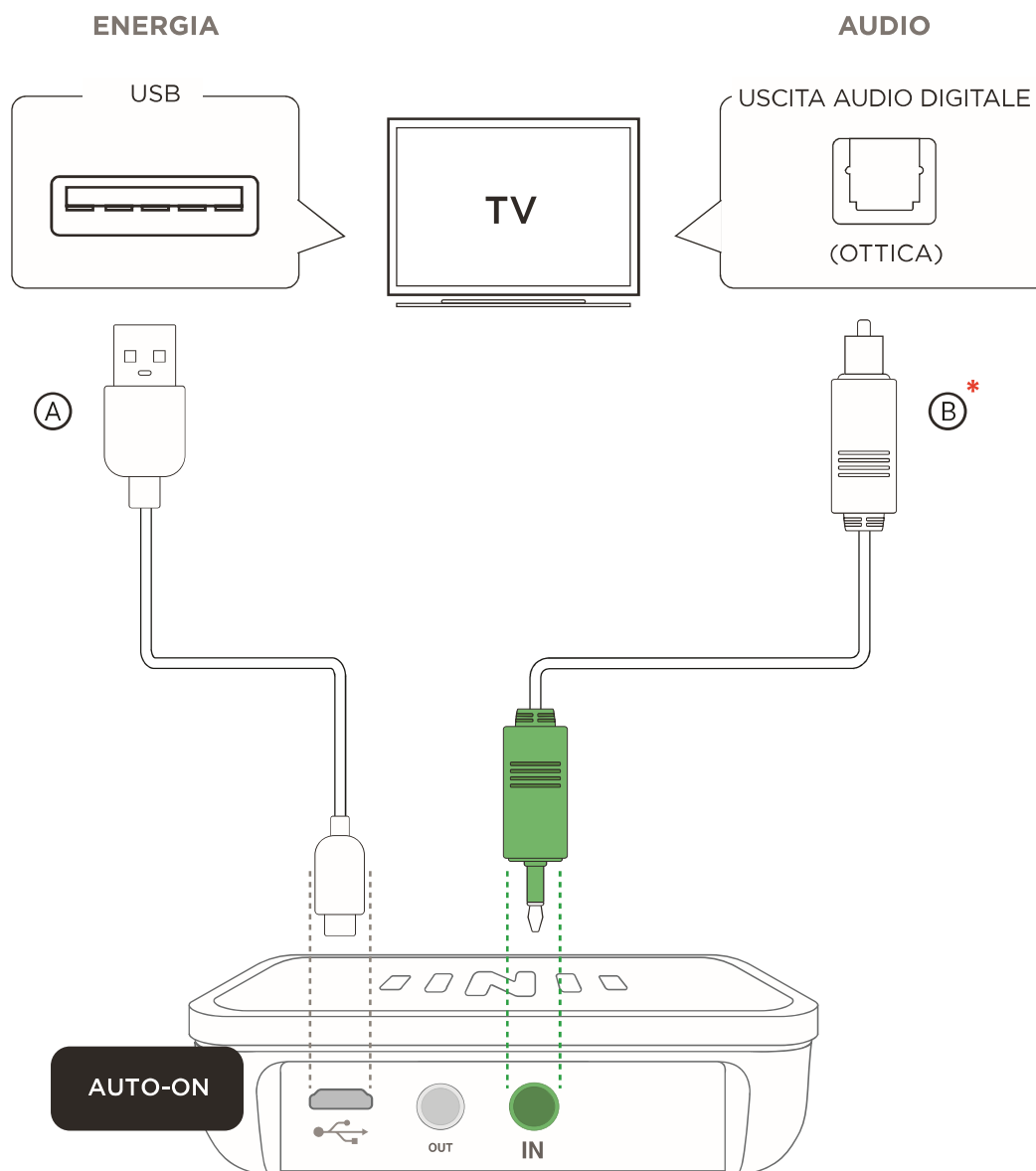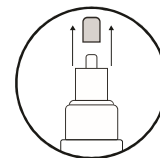

Potenza IQstream TV:

Collegate il cavo di alimentazione (A) ad una porta USB del TV. Se il vostro TV non ha una porta USB, cercate una fonte di alimentazione USB alternativa (es. caricatore a muro.)

Audio:

Collegate il cavo ottico digitale (B) dall'**USCITA** audio digitale sul vostro TV all'**INGRESSO** sul vostro IQstream.

Una volta collegati questi cavi andate a pagina 4 "Configurazione nell'App"

4. CONFIGURAZIONE NELL'APP

**Collegate i vostri IQbuds al vostro telefono.
Rimanete vicino al vostro IQstream e aprite la IQbuds app.**

Riceverete un rilevamento pop up e fatevi guidare nella impostazione.



I vostri IQbuds, IQstream e telefono lavoreranno tutti assieme.
La IQbuds app controllerà le funzioni IQstream.

AGGIORNAMENTI

Assicuratevi di avere l'ultima versione della IQbuds app.


Potremmo dover aggiornare il firmware dei vostri IQbuds. Vi suggeriamo di controllare gli aggiornamenti tramite:

www.nuheara.com/iqbuds-updater

5. GAMMA DI STREAMING OTTIMALE

Pareti, porte ed altri ostacoli potrebbero influenzare gamma e qualità.

Per un miglior risultato, ponete lo IQstream su una superficie piatta con il LED rivolto a voi.

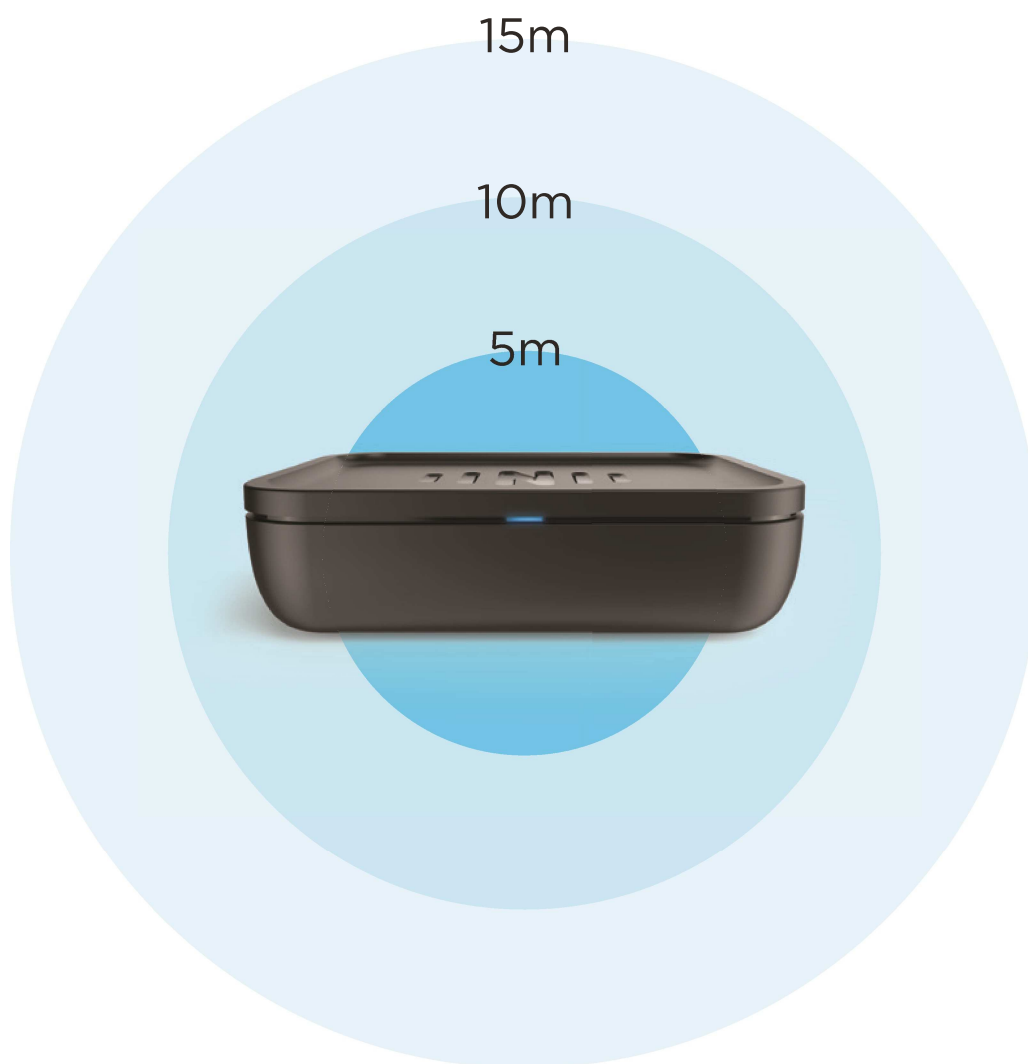

Il più forte


Il più debole



ASCOLTA
LA TV
MEGLIO

6. CONNESSIONI AUDIO ALTERNATIVE

SE LA VOSTRA TV NON HA PORTE OTTICHE DIGITALI, USATE LE OPZIONI QUI SOTTO. LA CONNESSIONE DI ALIMENTAZIONE È LA STESSA DI PAGINA 3.

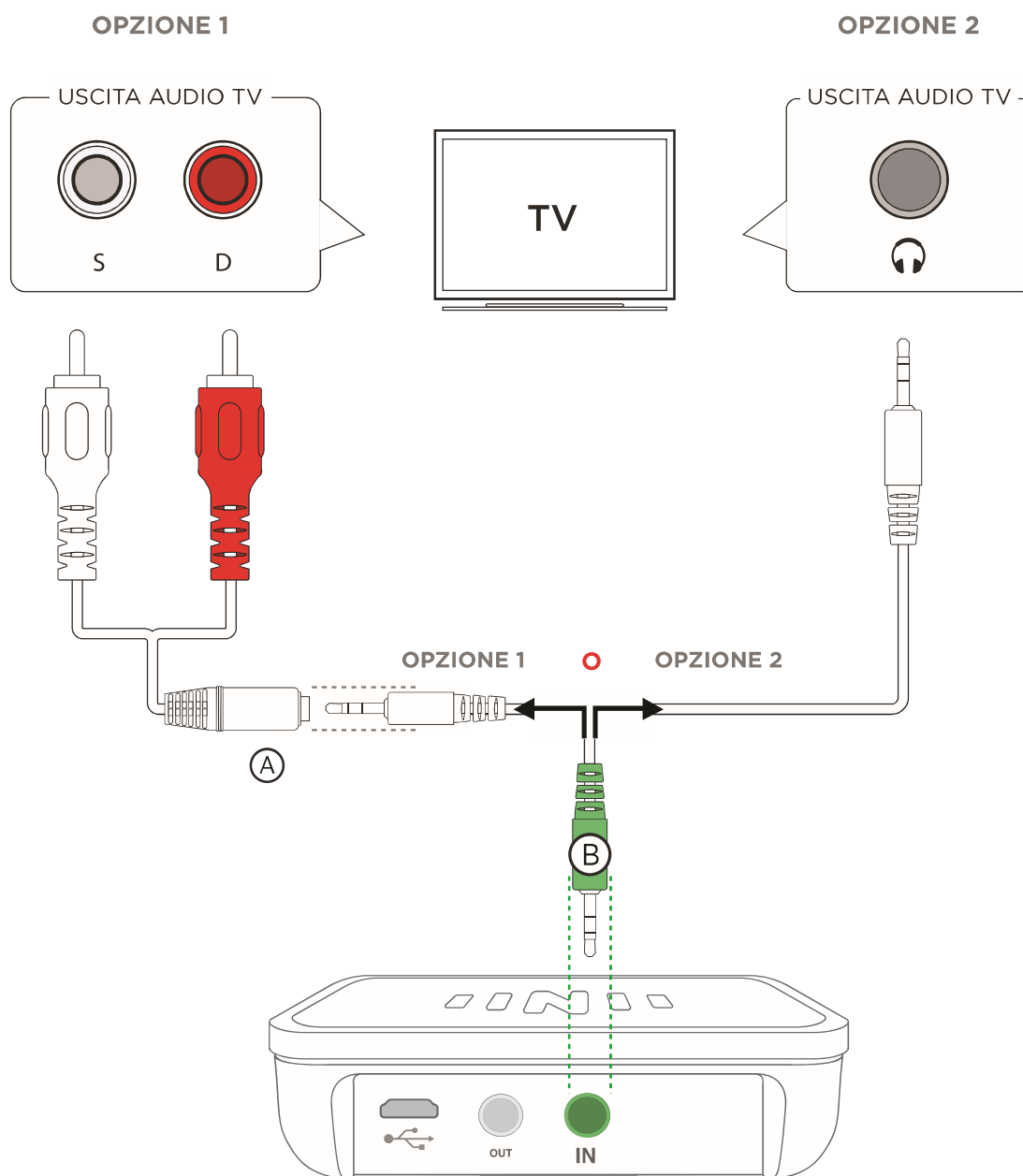

Opzione 1:

Collegate il cavo **(A)** RCA dalla vostra **USCITA** audio TV, nel cavo **(B)** 3.5 AUX, e poi nell'**INGRESSO** sul vostro IQstream.

Opzione 2:

Collegate il cavo **(B)** 3.5mm AUX direttamente dal jack per cuffia del vostro TV all'**INGRESSO** sul vostro IQstream.


Una volta collegati questi cavi andate a pagina 4 “Configurazione nell’App”

7. COLLEGAMENTO SOUND BAR/SOUND SYSTEM

TV è la vostra fonte primaria di suono. Il suono scorrerà:

Dalla vostra TV nell' IQstream e poi dal vostro IQstream nel vostro sound bar/altoparlante esterno.

Collegando il vostro TV all'IQstream al sound bar consentirà all'audio di scorrere attraverso tutti i 3 dispositivi.

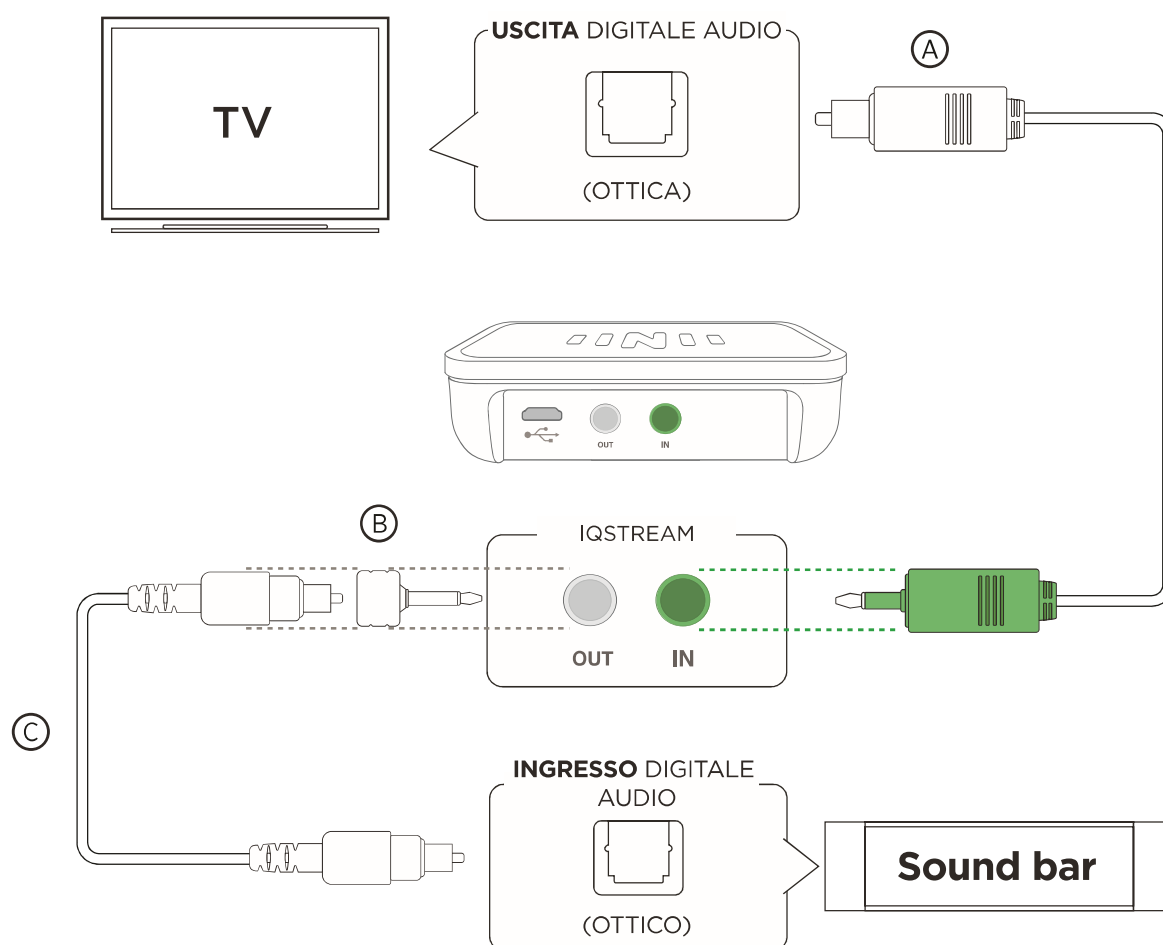

1. Collegate il cavo ottico digitale (A) dall'**USCITA** audio del vostro TV all'**INGRESSO** nell'IQstream. (Questo passo può già essere stato completato).

2. Collegate l'adattatore digitale ottico (B) (allegato) al cavo ottico (C) sound bar digitale (non allegato).

3. Collegate il cavo ottico digitale sound bar all'**INGRESSO** audio sound bar.

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI AUDIO


Non sentite alcun suono?

Controllate che i collegamenti audio siano nelle porte giuste sull'IQstream e TV. Assicuratevi che siano inseriti correttamente. Fate riferimento alla vostra opzione preferita nel manuale e controllate attentamente ognuno di loro.

Quando usate il cavo ottico digitale:

Controllate il manuale TV per trovare le impostazioni di uscita audio. Cambiate le impostazioni di uscita audio al PCM o bitstream off.

Comunemente trovato in: Menu>impostazioni audio. Riferito anche come SPDIF o uscita ottica.

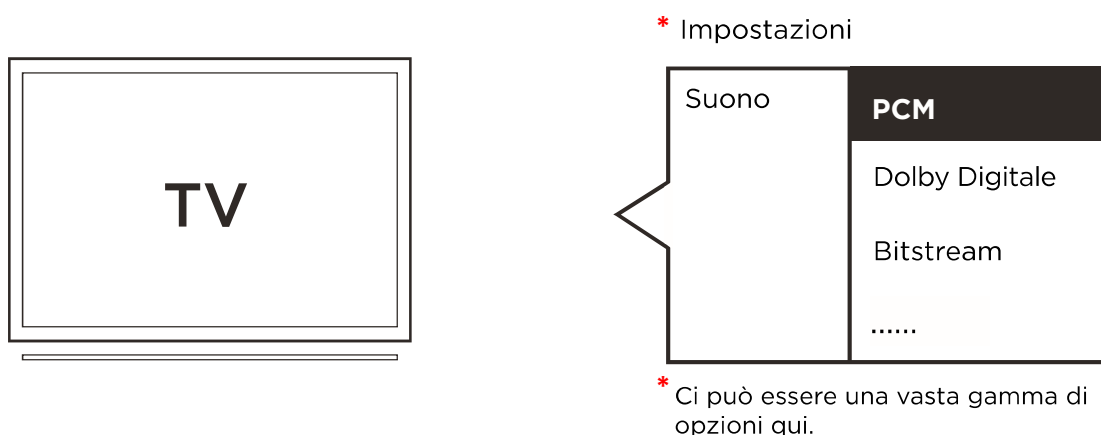

Quando usate il cavo 3.5mm AUX:

1. Usando unità esterne e computer inseriti nel vostro TV può causare problemi di qualità quando usate il cavo AUX. Se ne avete l'opzione, usate la soluzione cavo ottico digitale come indicato a pagina 3 "Collegamento con la TV".

2. Collegando il cavo AUX direttamente nel jack per cuffie nelle TV, potrebbe impedire all'audio di operare tramite gli altoparlanti TV e consentire solo di operare tramite gli IQbuds.

Per altra assistenza, rivolgetevi alla pagina del servizio clienti per trovare il vostro preferito metodo di contatto.

9. SOSTEGNO PER LA CLIENTELA



Qualche domanda? Siamo qui per aiutarvi!
Contattate il nostro gruppo di assistenza clienti.



care@nuheara.com



www.nuheara.com/support