




IQstream TV

取扱説明書




箱の中	1
製品の概要	2
テレビに接続 (クイック接続ガイド)	3
アプリで設定	4
ストリーミングの最適範囲	5
代替オーディオ接続	6
サウンドバー・サウンドシステムのリンク	7
オーディオトラブル解決作業	8
お客様サポート	9


1. 箱の中

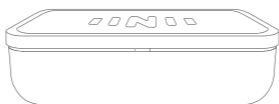


IQストリームテレビ

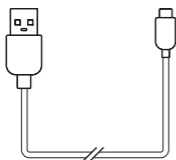


USBケーブル

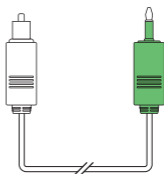

光デジタルケーブル

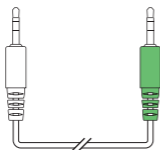


3.5mm AUX ケーブル

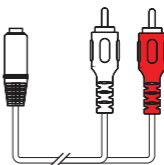


RCA ケーブル



光デジタルアダプタ

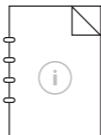

取扱説明書

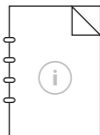


安全ガイド

2. 製品概要

前

後

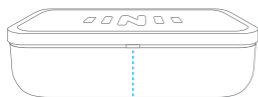

1



2

3

4

1 LED ライト表示器

2 USB 電源入力

3 オーディオ **OUT**


4 オーディオ **IN**

ライト状態表示器 (電源入力時)


設定モード

スタンバイ


ストリーミング

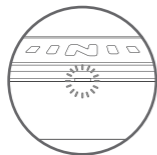

白点滅

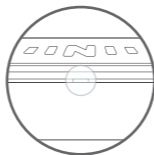

白点灯

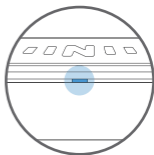


深青点灯

3. テレビに接続 (クイック接続ガイド)

最適な使用状態

*差し込む前に保護用のキャップを外してください。

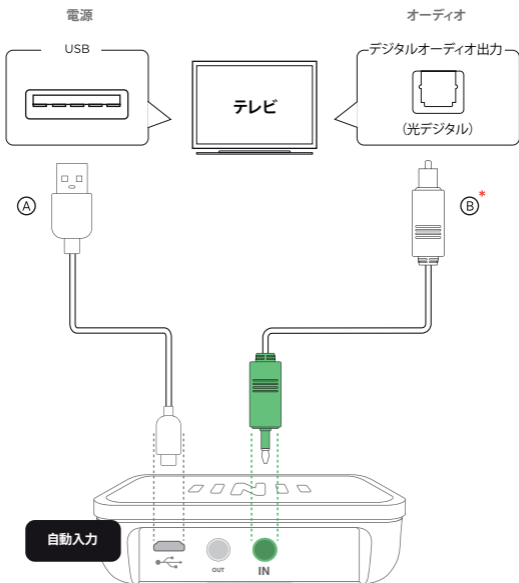

IQストリームをテレビにつける:

USB ケーブル(A)をテレビのUSB ポートに接続します。テレビにUSBポートがない場合、代替りのUSB電源を探します(例 コンセントにさして使える充電器)

オーディオ:

テレビのデジタルオーディオOUTからIQストリームのINに、光デジタルケーブル(B)を接続します。

ケーブル接続ができたなら P 4 の「アプリで設定」に進みます。

4. アプリで設定

IQbudsを電話に接続します。
IQストリームの近くでIQbuds アプリを開けてください。

探知できたらポップアップ画面が現れ、設定の仕方を教えてくれます。



IQbudsとIQストリームと電話がすべて同時に起動します。
IQbuds アプリがIQストリーム機能をコントロールします。

更新

IQbuds アプリの最新バージョンを使ってください。


IQbuds ファームウェアを更新する必要があるかもしれません。
更新については：

www.nuheara.com/iqbuds-updater
をチェックしてください。

5. 最適なストリーミング範囲

壁、ドアなど他の妨害物が範囲や質に影響するかもしれません。

平面にIQストリームを置き、LEDに直面する状態が一番快適な結果を得られます。

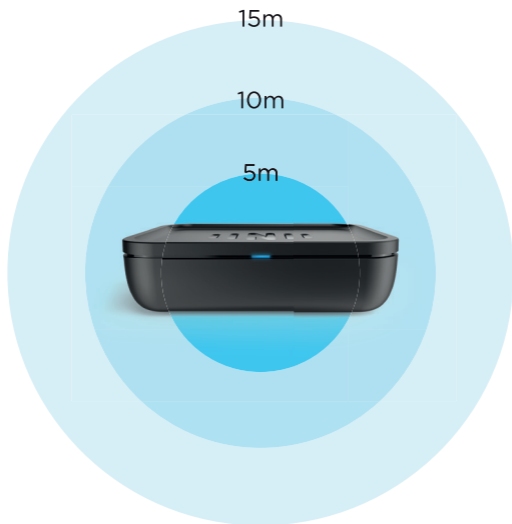

最強


最弱



テレビ
の音がキレイに聞こえる

6. オーディオ接続を交換します。

テレビに光デジタルポートがない場合、下記の物を使ってください。
電源接続はP 3と同じです。

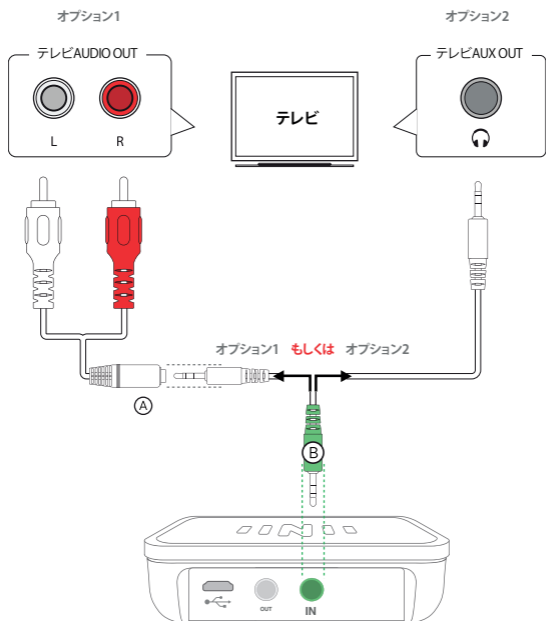

選択 1：

テレビのオーディオ**OUT** からRCAケーブル**Ⓐ**を、3.5mm AUXケーブル**Ⓑ**に接続してから、IQストリームの**IN**に接続してください。

選択 2：

テレビのヘッドホンジャックからIQストリームの**IN**に直接3.5mm AUXケーブル**Ⓑ**を接続してください。


ケーブル接続ができたなら **P 4**の「**アプリで設定**」に進みます。

7. サウンドバー・サウンドシステムのリンク

テレビが主な音源です。音が出てきます：

テレビの**OUT**とIQストリームへの**IN**、そしてIQストリームの**OUT**とサウンドバー・外部のスピーカーへの**IN**に。

テレビをIQストリーム、サウンドバーに接続すると、オーディオが3機器を通して流れるようになります。

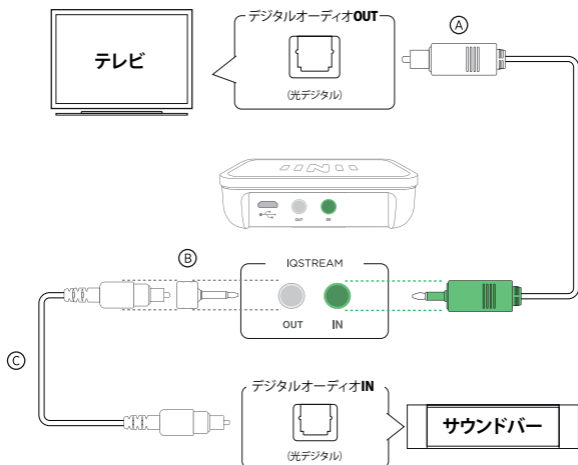

1. テレビのデジタルオーディオ**OUT**からIQストリームの**IN**に光デジタルケーブル**A**を接続してください。(この設定はすでにしているかもしれません。)

2. 光デジタルアダプター**B**(備品)をサウンドバー光デジタルケーブル**C**(備品外)に接続してください。

3. サウンドバー光デジタルケーブルをサウンドバーオーディオ**IN**に接続してください。

8. オーディオトラブル解決作業

音が全く聞こえない？

オーディオがIQストリームとテレビの正しいポートに接続されているかをチェックしてください。正しく挿入されているか確認してください。説明書にある接続の仕方を参照して、それぞれ注意深くチェックしてください。

光デジタルケーブルを使う時：

テレビの説明書でサウンド出力設定を確認してください。
サウンド出力設定のPCMかビットストリームをoffに変えてください。

普通ここにあります：メニュー>サウンド設定。SPDIF もしくは光デジタル出力を参照することができます。



* 設定

サウンド	PCM
	ドルビーデジタル ビットストリーム

* ここでの選択領域はかなり広いかもしれない。

3.5mmAUXケーブルを使用する場合：

1. テレビに外部のドライブとコンピューターをAUXケーブルで接続する時、オーディオの質に問題が出るかもしれません。できれば、P3の「テレビに接続」にある光デジタルケーブルの解決法を参照してください。

2. AUXケーブルをテレビのヘッドホンジャックに直接接続すると、テレビのスピーカーからの音声をブロックし、IQbudsからのみの音声が出力されるかもしれません。

お客様サポートページでお好みの連絡方法をお探してください。

9. お客様サポート



ご質問は?お答えします!
お客様ケアチームにご連絡ください。



care@nuheara.com



www.nuheara.com/support